

Ланцеты «Акку-Чек® Софтклик®» («Акку-Чек® Софтклик® XL»)



Защитный колпачок ланцета

Ланцет «Акку-Чек® Софтклик®»

Информация по безопасности



Используйте ланцеты «Акку-Чек® Софтклик®» («Акку-Чек® Софтклик® XL») только с устройством для прокалывания пальца Акку-Чек® Софтклик®.



Чтобы избежать попадания инфекции, используйте каждый раз для получения капли крови новый ланцет. Использование ланцета один раз позволяет добиться практически безболезненного прокола кожи.

Установка или замена ланцета

1.



Снимите колпачок устройства для прокалывания пальца (1).

2.



Если ланцет Акку-Чек® Софтклик® («Акку-Чек® Софтклик® XL») уже находится в устройстве для прокалывания пальца, потяните за сдвигающийся сектор удаления ланцета и удалите ланцет (2).

3.



Установите новый ланцет в держатель ланцета устройства для прокалывания пальца и нажмите до упора (3).

4.



Удалите защитный колпачок с ланцета скручивающими движениями (4).



У ланцетов «Акку-Чек® Софтклик® XL» (пластик желтого цвета) основание иглы толще, чем у обычных ланцетов «Акку-Чек® Софтклик®» (пластик белого цвета). Это позволяет более легко получить каплю крови из альтернативных мест.

5.



Установите колпачок устройства для прокалывания пальца Акку-Чек® Софтклик® на место до упора. Убедитесь, что Вы совместили выемку колпачка устройства для прокалывания пальца с центром полугруглого выреза на сдвигающемся секторе удаления ланцета (5).

Подготовка к получению капли крови

Самым лучшим местом для получения капли капиллярной крови являются кончики пальцев. Мы рекомендуем использовать для получения капли крови боковые поверхности кончиков пальцев, так как в этих местах минимальны болезненные ощущения, возникающие при про-

коле. Также у Вас есть возможность использовать образцы капиллярной крови, полученной из альтернативных мест, таких как плечо, предплечье, область большого пальца на ладони, часть ладони напротив области большого пальца, бедра или икры ног. Измерение уровня глюкозы крови с использованием крови, полученной из альтернативных мест, называется Alternative Site Testing (AST).

Вымойте руки теплой водой и вытрите насухо, что будет способствовать лучшей циркуляции крови и выполнению гигиенических требований. Получите каплю крови в соответствии с инструкцией, прилагаемой к устройству для прокалывания пальца Акку-Чек® Софткликс®.

Последующий уход за местом прокола

Протрите место прокола сухой чистой салфеткой и следите за тем, чтобы в дальнейшем оно оставалось чистым.

Расшифровка символов



Пожалуйста, прочтите эти примечания с особенным вниманием



Исключительно для индивидуального использования



Ланцеты могут быть использованы только до окончания срока годности, указанного на упаковке



Номер лота



Ланцеты были стерилизованы гамма излучением 25 kGy



Данная продукция отвечает требованиям Директивы 93/42/ЕЕС от 14 июня 1993 года в отношении медицинских приборов.

Патенты

EP-B-0565970. US Re 35803,

Модель дизайна в Германии: DE 49900488.4

В США и многих других странах, компания «Рош Диагностика» запатентовала устройство для прокалывания пальца Акку-Чек® Софткликс® и его использование с ланцетами Акку-Чек® Софткликс®, или патенты находятся в стадии получения.

Ланцеты Акку-Чек® Софткликс® Вы можете использовать только с устройством для прокалывания пальца Акку-Чек® Софткликс®.

Каталожные номера:

Ланцеты «Акку-Чек® Софткликс® №25» 03307492001

Ланцеты «Акку-Чек® Софткликс® №200» 03307484001

Ланцеты «Акку-Чек® Софткликс® XL №50» 03307514001



Поставщик:

ЗАО «Рош-Москва»

Информационный центр:

8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для всех регионов России).

Телефон для звонков по г. Москве: (095) 258-27-89

Адрес в Интернете: www.accu-check.ru

E-mail: info@accu-check.ru

125445 Москва, Россия, Коммерческая Башня «Меридиан», ул. Смольная 24 Д, 13 этаж.

Производитель:

Рош-Диагностика ГмбХ, ФРГ

Торговая марка АККУ-ЧЕК и СОФТКЛИКС являются зарегистрированными торговыми марками Группы компаний Рош