

«Акку-Чек Покет Компасс» Программное обеспечение

Краткое руководство по эксплуатации

В комплект компакт-диска «Акку-Чек® Покет Компасс» входит:

- Программное обеспечение «Акку-Чек® Покет Компасс»
- Подробное Руководство Пользователя в формате Adobe Portable Document (*.pdf)
- Программа установки Conduit
- Программа Adobe Reader

Требования, предъявляемые к программному и техническому обеспечению

Для установки и использования «Акку-Чек® Покет Компасс» Вам понадобится:

1. Персональный компьютер:
 - с Windows 98 SE, Me, NT 4 (SP 5/6), 2000 или XP
 - с минимальным свободным местом на диске в размере 5 MB
 - с дисководом CD-ROM
 - с USB или последовательным интерфейсом для портативного базового блока (док-станция)
2. Установленное программное обеспечение Palm Desktop (для HotSync и для ручной программной установки «наладонника»)
3. Портативное устройство:
 - совместимое с Palm OS 4.0 – 5.2.1
 - с 2 MB свободной памяти
4. Прибор для измерения уровня глюкозы крови или инсулиновая помпа, совместимые с инфракрасным портом от компании «Рош – Диагностика» (за исключением случаев ручного ввода данных).

Все приложения должны быть установлены так, как рекомендуется производителем в Руководстве Пользователя

Пожалуйста, обратите внимание!

Программное обеспечение «Акку-Чек® Покет Компасс» Версии 2.0 не совместимо с «наладонником» с процессором типа OMAP от компании Texas Instruments. Устройства с подобным типом процессора не поддерживают наш протокол передачи данных через инфракрасный порт, т.е. загрузка данных из помп и приборов для измерения глюкозы крови НЕВОЗМОЖНА.

Начало

Определить доступную свободную память и версию Palm OS Вашего «наладонника»

1. Включите Ваш «наладонник».
2. Когда Главная страница появилась на дисплее, нажмите кнопку Menu. На экране появится перечень команд Меню.
3. Нажмите команду Info. На дисплее появится информация о распределении объема памяти.
4. Нажмите кнопку Version. На дисплее появится информация о версии программного обеспечения устройства Palm OS.

Установить программное обеспечения «Акку-Чек® Покет Компасс»

Установка программного обеспечения для персонального компьютера и Руководства Пользователя.

1. Вставьте компакт-диск «Акку-Чек® Покет Компасс» в дисковод Вашего компьютера.

Если установка не начинается автоматически:

2. На панели задач нажмите кнопку Start (Старт), а затем выберите пункт меню Run (Пуск)...Затем напечатайте «D:\Setup\Setup.exe» (если необходимо, замените букву «D» на букву, обозначающую дисковод Вашего компьютера)
3. Нажмите кнопку «ОК» и следуйте инструкциям, которые появятся на дисплее.

Во время установки Вы можете выбирать те компоненты, которые хотите установить. «По умолчанию», устанавливаются все компоненты (программа, Руководство Пользователя, Conduit). Вы должны всегда выбирать «program» («программа»), для того, чтобы «Акку-Чек® Покет Компасс» установился на Ваш «наладонник» во время следующего процесса синхронизации Hotsync. Вам следует установить Руководство Пользователя, так как оно дает детальное описание того, как пользоваться программным обеспечением «Акку-Чек® Покет Компасс».

Вам потребуется программа Conduit в том случае, если Вы хотите использовать HotSync для передачи данных, хранящихся в «Акку-Чек® Покет Компасс», в программное обеспечение «Акку-Чек® Компасс» или «Акку-Чек® Камит Про»).

Установка Adobe Reader

Если на Вашем компьютере не установлена программа Adobe Reader, Вы можете установить эту программу напрямую с компакт-диска «Акку-Чек® Покет Компасс».

1. Вставьте компакт-диск «Акку-Чек® Покет Компасс» в дисковод Вашего компьютера.
2. Нажмите кнопку Start (Старт) на панели, а затем выберите пункт меню Run (Пуск)...Затем напечатайте «D:\Manuals\English\ar500enu.exe» (замените букву «D» на букву, обозначающую дисковод Вашего компьютера).
3. Нажмите кнопку «ОК» и следуйте инструкциям, которые появятся на дисплее.

Информационный центр: 8-800-200-88-99
(звонок бесплатный для всех регионов России)

Телефон для звонков по г. Москве: (095) 258-27-89

E-mail: info@accu-check.ru

Адрес в Интернете: www.accu-check.ru

АККУ-ЧЕК

является зарегистрированной торговой маркой Группы компаний Рош

Рош-Диагностика ГмбХ, ФРГ,

Установка программного обеспечения «Акку-Чек® Покет Компасс» на Ваш «наладонник»

Во время установки программного обеспечения «Акку-Чек® Покет Компасс», программный файл для Вашего «наладонника» был скопирован в Вашу папку Palm Desktop. Как только Вы выполните операцию HotSync, программное обеспечение «Акку-Чек® Покет Компасс» будет автоматически установлено на Ваш «наладонник». Вы можете найти информацию о HotSync в Руководстве Пользователя Вашего «наладонника».

Изучите Руководство Пользователя, расположенное на Вашем жестком диске

(Во время установки Вы должны заранее выбрать опцию, которая устанавливает Руководство Пользователя на жесткий диск)

Два раза щелкните на ссылке Руководства Пользователя «Акку-Чек® Покет Компасс», которая была создана на рабочем столе Вашего компьютера во время установки.

Примечание: Если Вы хотите использовать «Акку-Чек® Покет Компасс» с приборами для измерения уровня глюкозы крови или с инсулиновой помпой, Вы должны следовать инструкциям по синхронизации, изложенным в Руководстве Пользователя. Для успешной передачи данных, обязательным условием является то, что на всех устройствах должны быть установлены одни и те же время и дата и чтобы они были синхронизированы.

Свяжитесь с компанией «Рош-Диагностика»

Если Вы столкнулись с проблемами, в первую очередь обратитесь к соответствующим разделам Руководства Пользователя. Если Вы не можете решить проблему, свяжитесь с Представительством компании «Рош-Диагностика».

Примечание: Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом по использованию программного обеспечения «Акку-Чек® Покет Компасс», как одной из частей плана Вашего контроля за диабетом. Всегда обращайтесь к своему лечащему врачу, когда у Вас возникают вопросы, связанные с сахарным диабетом.

Системы компании «Рош-Диагностика», которые поддерживаются программным обеспечением «Акку-Чек® Покет Компасс»

- Загрузка данных через инфракрасный порт происходит из следующих устройств:
 - помпы «Акку-Чек® D-TRON plus»
 - прибора «Акку-Чек® Актив»
 - прибора «Акку-Чек® Гоу»
 - прибора «Акку-Чек® Компакт»
- При использовании дополнительного инфракрасного переходника (Assu-Chek IR Key) загрузка данных через инфракрасный порт происходит также из следующих устройств:
 - прибора «Акку-Чек® Адвантадж»
 - прибора «Акку-Чек® Сенсор»
 - прибора «Акку-Чек® Комфорт»

Работа с программным обеспечением «Акку-Чек® Покет Компасс»

Основные отличия от предыдущей версии

Синхронизация

Важное значение имеет первоначальная связь между программным обеспечением «Акку-Чек® Покет Компас» Версии 2.0 и устройствами (приборами и/или инсулиновой помпой).

Программное обеспечение «Акку-Чек® Покет Компасс» Версии 2.0 импортирует данные только со знакомых ему устройств, которые ему определил пользователь, чтобы быть уверенным, что считываются только его/ее персональные данные (а не данные с приборов других людей). Это «знакомство» называется Синхронизация (эта процедура не имеет ничего общего с функцией HotSync). Программное обеспечение «Акку-Чек® Покет Компасс» Версии 2.0 проводит первоначальный контакт с помпой, чтобы удостовериться, что установки даты и времени всех устройств совпадают.

Без этой настройки невозможна передача данных с устройств (помп и/или прибора).

Вы можете загрузить только те данные, которые были сохранены в устройствах после первоначальной синхронизации. Нельзя гарантировать правильность всех предыдущих данных в отношении даты и времени, поэтому проведение анализа данных невозможно.

Обзор Функций и Преимуществ

Функция	Преимущество
Удобный для пользователя интерфейс	Прост в эксплуатации
Анализ данных	Помогает проанализировать сохраненные данные
Память для хранения данных	Позволяет Вам хранить: <ul style="list-style-type: none">– 3000 записей дневника– 6000 записей базального уровня– 90 измерений артериального давления– 50 записей уровня кетонов– 12 записей HbA1c
Удобное отображение информации	Данные воспроизводятся графически или в виде таблицы
Совместимость с другими программами обработки данных «Акку-Чек®»	Позволяет анализировать данные с «Акку-Чек® Камит Про», «Акку-Чек® Компасс», «Акку-Чек® Смарт Принтер»
Позволяет вводить данные вручную	Такие данные, как уровни глюкозы в крови, количества вводимого инсулина, углеводы, сопровождающие события, комментарии, кетоны, результаты HbA1c, измерения артериального давления можно вводит вручную
Портативный	Дает Вам дополнительную функциональность. Вы можете взять свое программное обеспечение с собой куда угодно.
Календарь	Позволяет Вам вводить напоминания и устанавливать сигналы будильника, которые будут напоминать Вам о времени приема лекарств и т.д.
Инфракрасный передатчик (IR)	Получение данных из инсулиновой помпы Assu-Chek D-TRON plus и из приборов серии Акку-Чек®: Акку-Чек® Актив, Акку-Чек® Компакт, Акку-Чек® Гоу. Из приборов Акку-Чек® Адвантадж, Акку-Чек® Сенсор, Акку-Чек® Комфорт при использовании соответствующего инфракрасного переходника Акку-Чек® (Assu-Chek IR Key)
Индикатор батарейки	Отражает уровень батарейки на дисплее. Служит для напоминания необходимости частой передачи данных в Ваш персональный компьютер.