

## Аккутренд Контроль СН 1

Для контроля работы приборов *АККУТРЕНД® GC, GCT* и тест-полосок *АККУТРЕНД® Холестерин*

**Проведение контрольной процедуры:** *АККУТРЕНД® Контроль СН 1* предназначен для ИН ВИТРО ДИАГНОСТИКИ. Допустимые пределы значения при проведении контрольной процедуры находятся на вкладыше в упаковке. Пожалуйста, обратите внимание на то, что результат будет различным при использовании различных серий тест-полосок (кодовых номеров). Кодовый номер для данных тест-полосок нанесен на этикетку флакона с тест-полосками, либо указан на вкладыше к упаковке. Пожалуйста, обратите внимание на дополнительную информацию, которая может входить в упаковку с тест-полосками, особенно если она уточняет специфичные границы для серий контрольных растворов.

Работа системы считается удовлетворительной, если полученный результат находится в указанных пределах. Вам следует провести повторное исследование если полученный результат не укладывается в указанные пределы. Если при повторном проведении анализа, результат не укладывается в указанные пределы, Вам следует позвонить в компанию ЗАО "Рош-Москва".

Перед проведением проверки Вашего прибора *АККУТРЕНД® GC GCT*, пожалуйста, прочтите Руководство Пользователя. Проведение контрольного исследования проводится аналогично обычному определению холестерина, однако вместо капли крови, следует использовать контрольный раствор *АККУТРЕНД® Контроль СН 1*. Флакон содержит стерильный раствор. Не следует прикасаться руками к кончику флакона (возможно загрязнение). Извлеките тест-полоску из флакона (проверьте условия хранения и срок годности). Нанесите одну каплю контрольного раствора на тест-полоску. Флакон должен быть расположен вертикально, таким образом, чтобы кончик флакона находился приблизительно на расстоянии 1 см от тестового поля (не следует прикасаться кончиком флакона к тестовому полю). Перед тем как закрыть крышечкой флакон, промокните кончик флакона чистым ватным тампоном или одноразовой салфеткой. Плотнo закройте флакон крышкой.

**Важно:** не следует проводить контрольные исследования при температуре ниже +18 °С или выше +32 °С. Не следует проводить контрольное исследование если Вы нанесли несколько капель раствора на тестовое поле, либо капля раствора не покрыла тестовое поле полностью. Если Вы хранили контрольный раствор или тест-полоски в холодильнике, перед проведением контрольного исследования они должны достигнуть комнатной температуры.

**Возможные ошибки:** если при проведении проверки прибора с использованием контрольного раствора *АККУТРЕНД® Контроль СН 1* результаты не соответствуют пределам, указанным на флаконе с тест-полосками, следует проверить:

- правильность проведения процедуры анализа холестерина (обратитесь к Руководству пользователя)
- возможность загрязнения направляющей тест-полосок
- срок годности, условия хранения контрольного раствора
- проведение анализа должно проходить при комнатной температуре. Прибор, тест-полоски, и контрольный раствор должны соответствовать комнатной температуре

**Срок годности:** контрольный раствор *АККУТРЕНД® Контроль СН 1* следует хранить при температуре от +2°С до + 25°. Не следует замораживать. Условия хранения указаны на упаковке. Срок годности открытого контрольного раствора составляет 60 дней с момента открытия флакона, при условии соблюдения указанного температурного режима хранения. Не следует использовать контрольный раствор после истечения срока годности, указанного на упаковке. Обязательно укажите на этикетке флакона дату, когда флакон был открыт.

**Когда следует проводить контрольное исследование:**

- для того что бы научиться определять холестерин
- после замены батареек

после осуществления кодировки прибора  
при получении неожиданных для Вас результатов, особенно если эти результаты выше, чем Вы ожидали

Инструкция по использованию контрольных растворов подготовлена: Март 2003

**Упаковка:** упаковка содержит флакон с 1,5 мл контрольного раствора. Этого объема хватает для проведения приблизительно 30 контрольных определений.

В соответствии с техническими условиями флакон заполнен не полностью.

ДЛЯ ИН ВИТРО ДИАГНОСТИКИ

**Поставщик:**

ЗАО «Рош-Москва», отделение «Диагностика», 125445 Москва, Россия, Коммерческая Башня «Меридиан», ул. Смольная 24Д, 13 этаж

«Информационный центр»: 8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для всех регионов России), телефон для звонков по Москве: (095) 258 27 89.

[www.accu-check.ru](http://www.accu-check.ru)

[www.rocche.ru](http://www.rocche.ru)

[www.rocche.com/diabetes](http://www.rocche.com/diabetes)